

Evolutis

CRÉATEUR FABRICANT



EMERGENCE[®] Cup

References

Cup / Cupule EMERGENCE		
	Ø 22.2 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 58		H23 E2858

Technique Opératoire



1- Après fraisage de l'acétabulum et excision des ostéophytes, nettoyer et sécher soigneusement l'acétabulum.

2- Préparer le manche d'impaction en vissant le manche d'impacteur sur le corps d'impacteur, puis en vissant l'embout au diamètre sélectionné (Ø22.2mm ou 28mm) sur la platine du corps d'impacteur.



Faire servir la cupule définitive de la taille sélectionnée, puis la mettre en place sur la platine en veillant à aligner les trous de la cupule avec les ergots de la platine.

3- Sélectionner de préférence un ciment de viscosité haute. Après préparation du ciment osseux, mettre en place manuellement une dose directement au fond de l'acétabulum.

4- Introduire la cupule dans l'acétabulum, et vérifier les orientations (version et antéversion) en positionnant au besoin la tige d'orientation dans le trou correspondant au côté opéré.

5- Impacter 2 coups sur le manche vertical (en T), puis finir l'impaction en martelant sur l'autre manche.

6- Maintenir la pression sur le manche -sans changer de position- jusqu'au durcissement complet du ciment.

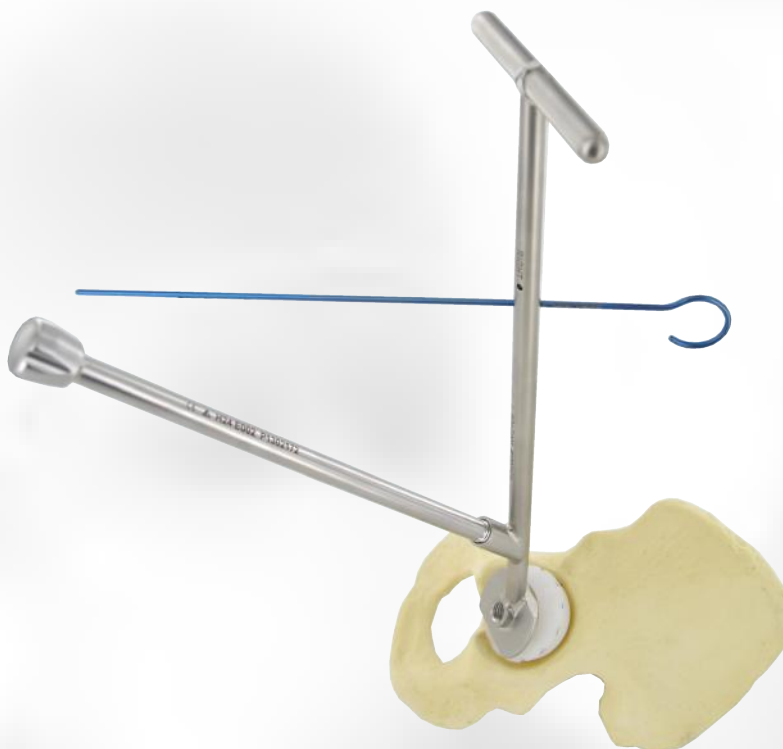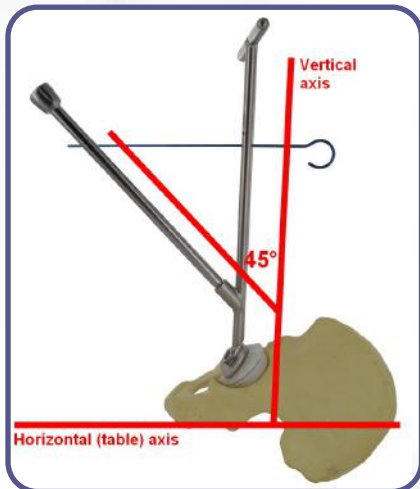

Instrumentation H24 9100 Instrument set

Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100
Corps d'impacteur	H24 E001
Manche d'impacteur	H24 E002
Embout pour tête Ø22.2	H03 023
Embout pour tête Ø28	H03 024
Tige d'orientation	E28 007

Mentions légales :

Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée. NE PAS UTILISER ces implants dans le cadre d'une arthroplastie sans ciment.
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge, merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie www.ameli.fr.
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Cups: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, radiolucent ring in stainless steel according ISO 5832-1
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Cupules: UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1

Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac